

**Liceul Tehnologic Johannes Lebel
Tâlmăciu**



**IN ATENTIA PĂRINȚILOR,
INSTRUCTIUNE DE ADMINISTRARE A
TESTELOR RAPIDE ANTIGEN NONINVAZIVE
EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ**



Prezenta instrucțiune este realizată în baza ORDINULUI nr. 5.608/2.506/2021 privind completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și a Instrucțiunii Nr. 2.503 din 19 noiembrie 2021 a Ministerului Sănătății privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvasive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ



- Testele rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă, se vor efectua la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal.



- Rezultatul testării se comunică de către părinți/reprezentantului legal de îndată, în scris sau electronic, unității de învățământ, urmând ca rezultatele să fie colectate, centralizate și comunicate persoanei responsabile desemnate conform art. 11.



METODOLOGIE DE LUCRU LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN SCOPUL IDENTIFICĂRII RAPIDE A EVENTUALELOR CAZURI DE INFECȚIE CU VIRUSUL SARS-CoV-2

- Se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă.



- Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează:
 - a) în **prima** și în **a 4-a zi lucrătoare** a săptămânii, **înaintea începerii orelor de curs**;
 - b) testarea se va efectua la **domiciliu**, sub îndrumarea părinților/reprezentanților legali;

RECOMANDĂRI GENERALE DE UTILIZARE A TESTELOR RAPIDE ANTIGEN EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ:

1. Se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;
 2. Se păstrează testele între $+2 - +30^{\circ}\text{C}$;
 3. Se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;
 4. Se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;
 5. Se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului;
 6. Se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și suprafețelor.
- 

PROCEDURA

DE ADMINISTRARE A TESTELOR RAPIDE ANTIGEN NONINVAZIVE EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ

- În situația în care în urma testării cu test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform Instrucțiunii Ministerului Sănătății nr. CAZ/4.216/19.11.2021, rezultatul este pozitiv, se aplică dispozițiile protocolului privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la pct. VI din anexa la prezentul ordin.
- Preșcolarul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform alin. (1), continuă activitatea didactică în regim online și poate relua cursurile cu prezență fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore.

TESTAREA PROPRIU-ZISĂ



1. Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și se va folosi cât de curând posibil;
2. Se așază dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată;
3. Se scoate un tub de extracție și o sticlă de soluție. Se scoate capacul și se adaugă soluția în tubul de extracție;
4. Se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei;
5. Se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extracție;
6. Se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca deșeu medical;
7. Se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția;
8. Se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (caseta);
9. Se citește rezultatul după 10-15 minute;
10. Se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare:



INTERPRETAREA TESTULUI

- **POZITIV:** apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare;
- **NEGATIV:** o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T)
- **NECONCLUDENT:** linia de control nu apare.



Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultatelor nule. Se revizuieste procedura și se repetă testul utilizând o nouă casetă de testare.




PRECIZĂRI:

- Preșcolarul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.
- în cazul preșcolarilor/elevi cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă la domiciliu, părinții/reprezentanții legali au obligația de a comunica în scris sau electronic unității de învățământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11 rezultatul testului;

„Ai grijă de corpul tău, pentru că este singurul loc unde va trebui să trăiești”
Jim Rohn

**Va multumim pentru buna colaborare și
încrederea acordată!**

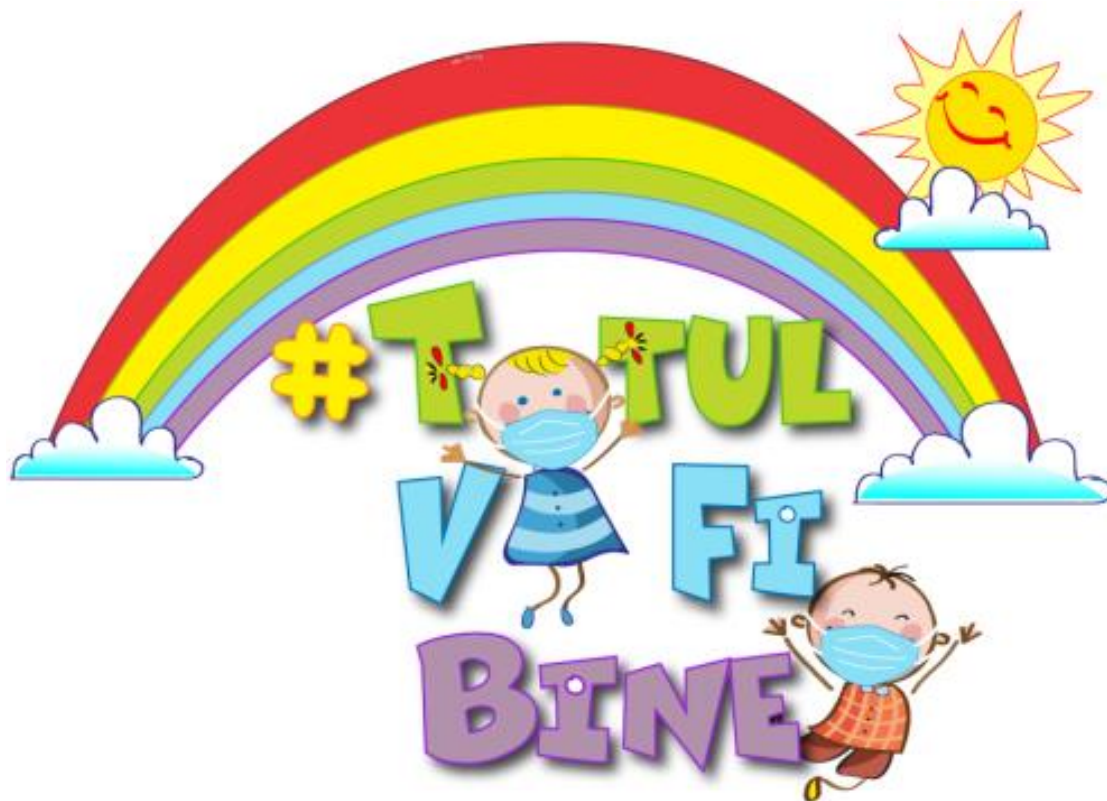

Cu deosebită considerație,
Director,
Prof. Dăncăneț Elena
Mona

